

earClin®

ear spray 3 in 1

1. ZAŠTO JE PREPORUČLJIVO DA ČISTIMO UŠI?
2. ŠTA JE EARCLIN EAR SPRAY 3 IN 1?
3. KAKO TREBA KORISTITI EARCLIN EAR SPRAY 3 IN 1?
4. DA LI EARCLIN EAR SPRAY 3 IN 1 MOGU DA KORISTE OSOBE SA SLUŠNIM APARATOM?
5. DA LI POSTOJE RIZICI POVEZANI S KORIŠĆENJEM EARCLIN EAR SPRAY 3 IN 1?
6. SADRŽAJ
7. PODACI ZA KONTAKT

OPŠTI SAVET:

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite earClin ear spray 3 in 1, iako ste ovo medicinsko sredstvo već koristili. Informacije u novom pakovanju su možda prilagođene najnovijim saznanjima i podacima. Sačuvajte ovo uputstvo. Možda će biti potrebno da ga ponovo pročitate.

1. ZAŠTO JE PREPORUČLJIVO DA ČISTIMO UŠI?

Telo prirodno proizvodi ušnu mast (cerumen). Ona štiti kažu ušnog kanala, pomaže kod čišćenja i podmazivanja, te pruža zaštitu od bakterija, gljivica i vode. Ušna mast se obično sama čisti prilikom žvakanja i drugih pokreta vilice. Kod nekih ljudi nastaje više masti, kod drugih manje, dok oni koji koriste slušne aparate, čepove za uši i ušne slušalice mogu da imaju probleme usled nagomilavanja ušne masti. Oblik ušnog kanala takođe može da otežava prirodno uklanjanje ušne masti. Kada ušna mast ne može da se pravilno odstrani, može doći do začepljenja uha, a začepljeno uho može da utiče na sluh i/ili ravnotežu.

Pažljivo osmišljenim i razvijenim earClin proizvodima može da se spreči potreba za ručnim uklanjanjem ušne masti. Ovi proizvodi predstavljaju odličnu alternativu korišćenju štapića za uši. Kod korišćenja štapića za uši postoji rizik od povrede bubne opne, kao i od pogoršanja problema guranjem suviše ušne masti dublje u ušni kanal.

2. ŠTA JE EARCLIN EAR SPRAY 3 IN 1?

earClin ear spray 3 in 1 može da se koristi za većinu uobičajenih poteškoća s uhom. earClin ear spray 3 in 1 koristite za:

1. ublažavanje bola i iritacija,
2. otčepljenje uha,
3. rastvaranje nagomilane ušne masti.

Potpuno prirodan earClin ear spray 3 in 1 napravljen je od biljnih ulja. Stoga je pogodan kako za odrasle, tako i za decu uzrasta 6 meseci i stariju. Posebno je napravljen da ublažava bol i iritaciju u uhu, začepljenje, kao i povećano stvaranje ušne masti.

3. KAKO TREBA KORISTITI EARCLIN EAR SPRAY 3 IN 1?

1 do 2 puta raspršiti u uho, do 3 puta dnevno.

Dobro protesti pre upotrebe. Sprej za uho earclean 3 in 1 je medicinsko sredstvo. earClin ear spray 3 in 1 nemojte koristiti duže od 30 dana uzastopno.

Način upotrebe: Kada se pakovanje koristi prvi put, preporučljivo je blaga protresti pre upotrebe. Neka vam maramica bude pri ruci. Približite mlaznicu ušnom kanalu. Raspršite 1 do 2 puta. Pritisnite poklopac ušnog kanala i masirajte uho od 5 do 10 sekundi. Očistite ušnu školju. Veoma je važno da zbog higijenskih razloga posle korišćenja temeljno očistite glavu spreja. Temeljno operite toplom vodom i osušite maramicom.

4. DA LI EARCLIN EAR SPRAY 3 IN 1 MOGU DA KORISTE OSOBE SA SLUŠNIM APARATOM?

earClin ear spray 3 in 1 pogodan je za osobe koje nose slušni aparat. Redovnim korišćenjem (od 2 do 3 puta sedmično) postiže se optimalna higijena ušnog kanala, što pozitivno doprinosi radu slušnog aparata.

5. DA LI POSTOJE RIZICI POVEZANI S KORIŠĆENJEM EARCLIN EAR SPRAY 3 IN 1?

Nisu poznata sporedna dejstva uzrokovana sastojcima korišćenim u earClin ear spray 3 in 1.

Alergije

Ako dođe do bilo kakve alergijske reakcije ili preosetljivosti na neki od sastojaka, prestatite s korišćenjem sredstva i posavetujte se s lekarom opšte prakse.

KORIŠĆENJE TOKOM TRUDNOĆE I/ILI DOJENJA:

earClin ear spray 3 in 1 može pouzdanu da se koristi tokom trudnoće ili dojenja. Ako imate nedoumice, posavetujte se s izabranim lekarom.

UZIMANJE ZAJEDNO S LEKOVIMA:

Nije preporučljivo da koristite earClin ear spray 3 in 1 ako već koristite lekove koji se stavljaju u uho.

KORIŠĆENJE KOD DECE:

Pošto je earClin ear spray 3 in 1 napravljen od ulja i sastojaka koji su potpuno zasnovani na biljkama, može da se koristi kod dece već od uzrasta 6 meseci. Pritom obratite pažnju na navedeno u odeljku „Upozorenja“.

▲ UPOZORENJE:

Sprej za uho ne koristite u slučaju probijene bubne opne ili Eustahijeve tube. Nemojte raspršivati u oči. Ako se sprej slučajno rasprši u usta ili oko, smesta isperite obilnom količinom vode. Držite van domašaja male dece.

6. SADRŽAJ

- 1 earClin ear spray 3 in 1 od 15 ml
- uputstvo za upotrebu

SASTOJCI: OLEUM EUROPEA, EKSTRAKT TESTERASTE PALME, KOMPLEKS FITOSTEROLA, BISABOLOL, ULJE LISTA CIMETA (CINNAMOMUM ZEYLANICUM), SUSAMOVO ULJE (SESAMUM INDICUM), EKSTRAKT KORONJE, ULJE LISTA KARJIA (MURRAYA KOENIGII), ULJE LISTA KARANFLICA (EUGENIA CARYOPHYLLUS), ULJE KLASASTE NANE. NE SADRŽI KONZERVANSE

NAČIN ČUVANJA:

Ovaj proizvod treba čuvati na hladnom mestu, dalje od sunčeve svetlosti, na sobnoj temperaturi (od 15 °C do 25 °C) i ne sme se izlagati temperaturama većim od 50 °C. Držite dalje od domašaja male dece.

☞ ROK UPOTREBE:

Nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe: potražite ga na dnu pakovanja.

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Znakovi i simboli upozorenja na pakovanju i uputstva za upotrebu veoma su neophodni kako biste osigurali da ovaj proizvod koristite bezbedno i pravilno i da zaštitite vas i druge od povreda. Simboli su objašnjeni u tabeli ispod:

Simbol	Objašnjenje	Simbol	Objašnjenje
	Simbol za proizvođača		Simbol koji označava jedinstvenu identifikacionu oznaku sredstvadevice
	Simbol koji označava da informacije treba potražiti u uputstvima za upotrebu		Ovlašteni predstavnik.
	Simbol koji označava da je neophodan oprez prilikom rukovanja sredstvom		Držite dalje od domašaja dece
	Evropski ovlašćeni zastupnik.		Simbol za broj serije
	Gornja temperatura granica (50°C)		Simbol koji označava da je proizvod medicinsko sredstvo
	Odlaganje otpada		Rok upotrebe
	Proizvod nije namenjen deci mlađoj od 6 meseci.		

Svaki ozbiljan incident koji se dogodi u vezi sa ovim proizvodom treba da bude prijavljen proizvođaču i nadležnom organu.

7. PODACI ZA KONTAKT

Ovlašćeni predstavnik za Srbiju:
AbelaPharm d.o.o
Viline vode bb, 11000
Beograd Srbija

OBELIS S.A.
53 Boulevard
Général Wahis 1030
Brussels, Belgium

Naveh-Pharma LTD.
11-19, Yad Harutzim St., P. 8139
Netanya, 4250519 Israel
www.navehpharma.com

