

earClin® earshower

ZA
DECU!

1. ZAŠTO TREBA DA ČISTITE UŠI?
2. ŠTA JE EARCLIN EARSHOWER ZA DECU?
3. KAKO SE KORISTI EARCLIN EARSHOWER ZA DECU?
4. DA LI EARCLIN EARSHOWER ZA DECU MOGU DA KORISTE DECA KOJA NOSE SLUŠNI APARAT?
5. DA LI POSTOJE RIZICI POVEZANI S KORIŠĆENJEM EARCLIN EARSHOWER ZA DECU?
6. ZAŠTO JE EARCLIN EARSHOWER ZA DECU BEZBEDAN ZA KORIŠĆENJE?
7. SADRŽAJ
8. PODACI ZA KONTAKT

1. ZAŠTO TREBA DA ČISTITE UŠI?

Ušna mast ili cerumen je supstanca koja se proizvodi u vašem telu i koja se uklanja sama. U njoj se nakupljaju nečistoće, bakterije i drugi ostaci. Ušna mast se obično sama odstranjuje prilikom žvakanja i drugih pokreta vilice. Ušna mast može da se nakupi i da ugrozi vaš sluh. Kada ušna mast dostigne ovaj obim, naziva se impakcija. Ako imate impakciju, možete iskusiti simptome kao što su:

- bol u ugroženom uhu,
- osećaj ispunjenosti ili zvonjenja u uhu,
- oslabljen sluh na ugroženom uhu,
- neprijatan miris iz ugroženog uha,
- vrtoglavica,
- kašalj.

Ako koristite slušni aparat, ušne čepove ili ušne slušalice, postoji veća verovatnoća da će doći do nastanka prekomerne ušne masti. Kod starijih osoba i kod ljudi sa smetnjama u razvoju postoji veći rizik od nastanka prekomerne ušne masti. Oblik ušnog kanala može da otežava prirodno uklanjanje ušne masti.

2. ŠTA JE EARCLIN EARSHOWER ZA DECU?

earClin earshower za decu razvijen je na osnovu iste tehnike koju koriste specijalisti za uho. earClin earshower za decu sadrži poseban sapun koji jednostavno spira prekomernu ušnu mast. Ovaj proizvod nežno ispira ušni kanal pomoću vode obogaćene posebnom sapunicom earClin. earClin earshower za decu omogućava jednostavan metod za čišćenje uha i predstavlja efikasno rešenje za redovno čišćenje ušnih kanala u udobnosti i praktičnosti vašeg doma. Kao i pranje zuba, ovakvo čišćenje ušiju treba da postane deo vaše lične zdravstvene i higijenske rutine. Sapunicom iz earClin earshower za decu jednostavno sperite prekomernu ušnu mast.

earClin earshower za decu za decu je naročito od pomoći:

- deci koja se redovno izlažu vodi
- deci kod koje se intenzivno stvara cerumen
- deci koja nose slušni aparat, zaštitu za uši ili ušne slušalice
- deci koja se redovno izlažu prašini ili nečistoći

3. KAKO SE KORISTI EARCLIN EARSHOWER ZA DECU?

earClin earshower za decu koristite redovno (od 2 do 3 puta sedmično) za održavanje čistoće kanala spoljašnjeg uha. Ako se nakupi prekomerna ušna mast (cerumen), earClin earshower za decu koristite svakog dana tokom 2 uzastopne sedmice. earClin earshower za decu koristite najviše 30 dana od prve upotrebe.

earClin earshower za decu namenjen je:

- za upotrebu kod dece od strane odrasle osobe
- deci sa slušnim aparatom
- deci koja žele da održavaju čistoću kanala spoljašnjeg uha
- za upotrebu kod dece (starije od 3 godine) od strane odrasle osobe

Najbolje je da earClin earshower za decu koristite tokom uobičajenog tuširanja ili kupanja. Upotreba po prvi put: 2 puta isperite earClin earshower za decu čistom vodom, nakon toga usisajte mlaku vodu u sredstvo (maks. 40 °C), isperite uho, a zatim ga osušite. Kao i prilikom metode profesionalnog čišćenja koju primenjuju specijalisti, earClin earshower za decu čisti uši prirodnom mlakom vodom. Štapić sapuna (medicinski sapun) u unutrašnjosti cevi ne omogućava samo postupak čišćenja, nego i pokazuje još koliko dugo se može koristiti earClin earshower za decu.

Kako se koristi earClin earshower za decu?

Ušni balon: Upotrebite ušni balon da uvučete mlaku vodu (maks. 40 °C) naviše u earClin earshower za decu i da je nežno unesete u ušni kanal. Zatim upotrebite earClin earshower za decu da udvujete vazduh u ušni kanal i pritom uklonite eventualnu preostalu vlagu. Pritisnite jednom da earClin earshower za decu napunite mlakom vodom. Prilikom svake upotrebe svako uho isperite 3 puta. Ušni balon u međuvremenu ne treba puniti.

Mlaznica za raspršivanje: Mlaznicu za raspršivanje postavite na ulaz ušnog kanala. Njen oblik i veličina sprečavaju da earClin earshower za decu slučajno gurnete preduboko u uho.

Blag i efikasan sapun: kada se sastoji sadržani u earClin earshower za decu pomešaju sa mlakom vodom nastaje posebna sapunica.

4. DA LI EARCLIN EARSHOWER ZA DECU MOGU DA KORISTE DECA KOJA NOSE SLUŠNI APARAT?

earClin earshower za decu je naročito predviđen za redovno korišćenje kod osoba koje nose slušni aparat (koristiti svakog dana pre odlaska na spavanje) i omogućava savršenu higijenu ušnog kanala koja je preko potrebna za pravilan rad uređaja.

5. DA LI POSTOJE RIZICI POVEZANI S KORIŠĆENJEM EARCLIN EARSHOWER ZA DECU?

earClin earshower za decu je veoma izdržljiv i naročito je osmišljen tako da ga mogu koristiti sve osobe starije od 3 godine. Čuvati dalje od dece mlađe od

3 godine. Postoji opasnost od gušenja malim delovima – držite dalje od domaća dece. Ako dođe da bilo kakve alergijske reakcije obustavite upotrebu earClin earshower za decu. Nemojte koristiti proizvod ako ste alergični na neki od sastojaka.

⚠ Ne sme se koristiti bez mišljenja lekara u slučaju upale uha, bola u uhu, probijene bubne opne i upale od strane bilo koje osobe koja je sklona vrtoglavici ili se istovremeno bolosti u vezi s uhom ili bubnom opnom. Možete imati impakciju cerumena, a da to ne znate. Postoji mogućnost da ta impakcija otegne usled dejstva earClin earshower za decu i da pritom uzrokuje neprijatan osećaj. U tom slučaju posavetujte se s lekarom.

earClin earshower za decu ne sme da se koristi:

- kod osoba kod kojih je prethodno postojala povreda (npr. probijanje) ili deformacija bubne opne
- kod osoba s prethodnom povredom ušnog kanala
- kod dece mlađe od 3 godine

⚠ Ako su ušni kanali blokirani, preporučujemo da posetite specijalistu za uho, grlo i nos. Nakon što specijalista profesionalno očisti uši, preporučujemo njihovo redovno ispiranje pomoću earClin earshower za decu kako bi se sprečilo dalje nagomilavanje ušne masti.

6. ZAŠTO JE EARCLIN EARSHOWER ZA DECU BEZBEDAN

Sa earClin earshower za decu temeljno se ispira cerumen bez bilo kakvog mehaničkog zahvata. Zbog okruglog oblika deo koji zalazi u uho, proizvod ostavlja prijatan osećaj u uhu korisnika. Dimenzije onemogućavaju preduboko zalaganje u ušni kanal, tako da su povrede zaista nemoguće, naročito povrede bubne opne. Istovremeno, deo koji zalazi u uho predstavlja glavu spreja. Patentirani koncept omogućava da se rastvor za ispiranje optimalno rasprši unutar ušnog kanala. Zaobljeni deo koji zalazi u uho ima i mehanizam koji štiti od prekomernog pritiska. Neka vam earClin earshower za decu bude na dohvat ruke prilikom tuširanja ili kupanja.

7. SADRŽAJ

- 1 earClin earshower za decu • Uputstvo za upotrebu

SASTOJCI: NATRIJUM-TALOVAT, GLICERIN, VODA, SORBITOL, SUKROZA, PEG-4001, TETRANATRIJUM

OBJAŠNJENJE SIMBOLA

Znaci i simboli upozorenja na pakovanju i u uputstvima za upotrebu veoma su važni – omogućavaju vam da bezbedno i pravilno koristite ovaj proizvod, kao i da sebe i druge zaštitite od povreda. Simboli su objašnjeni u tabeli u nastavku:

Simbol	Objašnjenje	Simbol	Objašnjenje
	Simbol za proizvođača		Simbol koji označava jedinstvenu identifikacionu oznaku sredstva
	Simbol koji označava da informacije treba potražiti u uputstvima za upotrebu		Proizvod nije namenjen deci uzrasta 3 godine i mlađoj.
	Simbol koji označava da je neophodan oprez prilikom rukovanja sredstvom		Držite dalje od domaća dece
	Datum proizvodnje		Simbol za broj serije
	Označava da medicinsko sredstvo treba zaštititi od vlage		Simbol koji označava da je proizvod medicinsko sredstvo

Svaki ozbiljan događaj u vezi s ovim proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom organu države članice u kojoj korisnik ima prebivalište.

8. PODACI ZA KONTAKT



Ovlašteni predstavnik proizvođača:
Abela Pharm d.o.o. Beograd
Vilinske Vode b.b., Beograd

Proizvođač:

TheOTClab
Fred. Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
Holandija
www.theotclab.com

