

earClin®

3in1 oorspray

1. **WAAROM WORDT ER GEADVISEERD OM ONZE OREN TE REINIGEN?**
2. **WAT IS EARCLIN 3IN1 OORSPRAY?**
3. **HOE MOET EARCLIN 3IN1 OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT?**
4. **KAN EARCLIN OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT DOOR MENSEN MET EEN GEHOORAPPARAAT?**
5. **ZIJN ER RISICO'S VERBODEN AAN HET GEBRUIK VAN EARCLIN 3IN1 OORSPRAY?**
6. **INHOUD**
7. **CONTACTGEGEVENS**

ALGEMEEN ADVIES:

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voor je earClin 3in1 oorspray gaat gebruiken, ook als je dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer je aan een nieuwe verpakking begint. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn deze nogmaals te lezen.

1. WHY IS IT ADVISED TO CLEAN OUR EARS?

Oorsmeen (cerumen) wordt op natuurlijke wijze door het lichaam geproduceerd. Het beschermt de huid van de gehoorgang, helpt bij het schoonmaken en smeren en biedt bescherming tegen bacteriën, schimmels en water. Meestal werkt de smeer zich naar buiten door kauwen en andere kaakbewegingen. Sommige mensen produceren meer oorsmeer dan anderen, en mensen die gehoorapparaten, oordopjes en in-ear koptelefoons gebruiken kunnen last hebben van een verhoogde ophoping van oorsmeer. De vorm van de gehoorgang kan ook complicaties veroorzaken bij het natuurlijk verwijderen van oorsmeer. Als het oorsmeer niet goed kan ontsnappen, kan het oor verstopt raken en een verstopt oor kan het gehoor en/of het evenwicht beïnvloeden.

De zorgvuldig ontworpen en ontwikkelde earClin producten kunnen voorkomen dat het oorsmeer handmatig verwijderd moet worden en zijn een uitstekend alternatief voor het gebruik van wattenstaafjes. Deze kunnen mogelijk het trommelflies beschadigen en het probleem zelfs verergeren door overtollig oorsmeer dieper in de gehoorgang te duwen.

2. WHAT IS EARCLIN 3IN1 EAR SPRAY?

De earClin 3in1 oorspray behandelt de meest voorkomende oorklachten. Gebruik earClin 3in1 oorspray, het:

- 1 Verlicht oorpijn & irritatie
- 2 Behandelt oorproppen
- 3 Verwijderd overtollig oorsmeer

De 100% natuurlijke EarClin 3in1 oorspray is samengesteld uit plantaardige oliën en is daarom geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 3 maanden. Het is speciaal ontwikkeld tegen oorpijn, irritatie, oorproppen en overtollig oorsmeer.

3. HOE MOET EARCLIN 3IN1 OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT?

1-2 verstuijvingen in het oor, tot 3 maal per dag. Goed schudden voor gebruik. EarClin 3in1 is een medisch hulpmiddel, gebruik de earClin 3in1 oorspray niet langer dan 30 opeenvolgende dagen.

Wijze van toepassing: Wanneer de verpakking voor de eerste keer wordt gebruikt is het raadzaam even te schudden voor gebruik. Zorg dat je een tissue bij de hand hebt. Breng het tuitje dicht bij de gehoorgang. Spray 1-2 keer. Druk de gehoorgang dicht en masseer het oor gedurende 5 tot 10 seconden. Veeg de oorschelp schoon. Om hygienische redenen is het belangrijk dat de spray na gebruik goed schoon wordt gemaakt. Grondig reinigen met warm water en droogmaken met een tissue.

4. KAN EARCLIN 3IN1 OORSPRAY WORDEN GEBRUIKT DOOR MENSEN MET EEN GEHOORAPPARAAT?

earClin 3in1 oorspray is geschikt voor mensen die een gehoorapparaat dragen. Regelmatig gebruik (2-3 keer per week) zorgt voor een optimale hygiëne van de gehoorgang, wat positief bijdraagt aan de werking van het gehoorapparaat.

5. ZIJN ER RISICO'S VERBODEN AAN HET GEBRUIK VAN EARCLIN 3IN1 OORSPRAY?

Er zijn geen schadelijke bijwerkingen bekend van de ingrediënten die in earClin 3in1 oorspray worden gebruikt.

Allergieën Stop met het gebruik van de spray en raadpleeg een huisarts bij een allergische reactie of overgevoeligheid voor een van de ingrediënten.

GEBRUIK TIJDENS ZWANGERSCHAP EN/OF BORSTVOEDING:

EarClin 3in1 oorspray kan met vertrouwen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding. Bij twijfel is het raadzaam om eerst de behandelend arts te raadplegen.

COMBINATIE MET GENEESMIDDELEN:

Het is niet aan te bevelen om earClin 3in1 oorspray te gebruiken als u al geneesmiddelen in het oor toepast.

TOEDIENING BIJ KINDEREN:

Omdat de earClin 3in1 oorspray uit 100% plantaardige oliën en ingrediënten bestaat kan de oorspray al bij kinderen vanaf 3 maanden toegepast worden. Vergeet daarbij niet de aandacht te schenken aan wat geschreven is onder "Waarschuwingen".

Δ WAARSCHUWINGEN:

De oorspray niet toepassen in gevallen van trommelvliesperforatie of trommelvliesbuisjes. Niet in de ogen verstuijven. Indien de spray per ongeluk in de mond of oog wordt gesprayd, deze direct uitspoelen met veel water. Buiten bereik van jonge kinderen houden.

6. CONTENT • 1 earClin 3in1 oorspray 15ml • Gebruiksaanwijzing

INGREDIENTS: OLEUM EUROPEA, ZEEZWEEP EXTRACT, FYTOSTEROLCOMPLEX, BISABOLO, CINNAMOMUM ZEYLANICUM (KANEEL) BLADOLIE, SESAMUM INDICUM (SESAM) OLIE, ZEEZWEPEXTRACT, MURRAYA KOENIGII (KERRIE) BLADOLIE, EUGENIA CARYOPHYLLUS (KRUIDNAGEL) BLADOLIE, MUNTOLIE VRIJ VAN CONSERVERINGSMIDDEL

WIJZE VAN BEWAREN:

Dit product dient u op een koele plaats, buiten invloed van zonlicht bij kamertemperatuur (15-25°C) te bewaren en niet blootstellen aan temperaturen boven de 50°C. Buiten bereik van jonge kinderen houden.

UITERSTE GEBRUIKSdatum:

Niet gebruiken na de vervaldatum: zie onderkant van de verpakking.

UITLEG VAN SYMBOLEN

De waarschuwingstekens en symbolen op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u dit product veilig en correct gebruikt en om u en anderen te beschermen tegen letsel. De symbolen worden in de onderstaande tabel uitgelegd:

Symbool	Verklaring	Symbool	Verklaring
	Symbool voor de fabrikant		Symbool dat de Unique device Identifier aangeeft
	Symbool dat aangeeft dat de gebruiksaanwijzing moet worden geraadpleegd		Importeur
	Symbool dat aangeeft dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat		Buiten bereik van kinderen bewaren
	Gemachtigd vertegenwoordiger van de EU		Symbool voor het partijnummer
	Bovengrens van temperatuur (50°C)		Symbool dat aangeeft dat het artikel een medisch hulpmiddel is
	Afvalverwerking		Te gebruiken tot: (vervaldatum)
	Niet voor kinderen van 3 maanden en jonger		

Elk ernstig incident dat zich in verband met dit product heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Distributeur:

TheOTC Lab
Fred. Roeskestraat 115,
1076 EE Amsterdam
The Netherlands
www.theotclub.com

Fabrikant:

Naveh-Pharma LTD.
11-19, Yad Harutzim St., P.O. 8139
Netanya, 4250519
Israel
www.navehpharma.com

OBELIS S.A.

53 Boulevard
Général Wahis 1030
Brussels,
Belgium

15ml