

earClin®

Spray para os ouvidos Advanced

1. SOBRE PROBLEMAS NOS OUVIDOS?

2. O QUE É O EARCLIN ADVANCED SPRAY PARA OS OUVIDOS?

3. COMO DEVE SER UTILIZADO O EARCLIN ADVANCED SPRAY PARA OS OUVIDOS?

4. O EARCLIN ADVANCED SPRAY PARA OS OUVIDOS PODE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM APARELHO AUDITIVO?

5. EXISTEM RISCOS ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DO EARCLIN ADVANCED SPRAY PARA OS OUVIDOS?

6. CONTEÚDO

7. CONTACTOS

CONSELHOS GERAIS:

Leia atentamente este folheto informativo antes de começar a utilizar earClin spray para os ouvidos, mesmo que já tenha utilizado este dispositivo médico anteriormente. As informações podem ter sido adaptadas de acordo com os dados e as informações mais recentes quando iniciar uma nova embalagem. Guarde este folheto, pode ser necessário lê-lo novamente.

1. SOBRE PROBLEMAS NOS OUVIDOS?

O canal auditivo externo é um orifício que, devido à sua estrutura típica, está sujeito a infeções causadas por água retida após uma atividade aquática, secura da pele ou corpo estranho no ouvido. Estes fenómenos comuns podem causar desconforto auricular, dor, comichão, infeções, alergia e até perda de audição

2. O QUE É O EARCLIN SPRAY PARA OS OUVIDOS?

O Earclin advanced spray para os ouvidos spray para os ouvidos spray para os ouvidos trata os problemas mais comuns dos ouvidos. EarClin Advanced alivia as dores de ouvido, as infeções e as irritações. Utilizar em casos de irritação dos ouvidos, infeções e dores de ouvido, sensibilidade diminuída aos sons.

O earClin spray ouvidos, 100% natural é composto por óleos de plantas, recomendado para adultos e crianças a partir dos 3 meses. Foi especialmente desenvolvido para tratar a dor do ouvido, irritações e o excesso de produção de cera nos ouvidos.

3. COMO DEVE SER UTILIZADO O EARCLIN ADVANCED SPRAY PARA OS OUVIDOS?

1-2 pulverizações no ouvido, até 3 vezes por dia.

Agitar bem antes de utilizar. O Earclin advanced spray para os ouvidos é um dispositivo médico e, por isso, não deve ser utilizado durante mais de 30 dias consecutivos.

Conselhos de utilização: Quando a embalagem é utilizada pela primeira vez, é aconselhável agitar antes de a utilizar. Tenha um lenço de papel à mão. Coloque o aplicador no canal auditivo. Pulverize 1 a 2 vezes. Pressione o canal auditivo para o fechar e massageie o ouvido durante 5-10 segundos. Limpe o ouvido. Por razões de higiene, é fundamental limpar bem o aplicador após a utilização. Limpar bem com água morna e secar com um pano.

4. O EARCLIN ADVANCED SPRAY PARA OS OUVIDOS PODE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM APARELHO AUDITIVO?

O earClin spray para ouvidos pode ser utilizado por pessoas que usam aparelho auditivo. A utilização regular (2-3 vezes por semana) garante uma higiene ideal do canal auditivo, o que contribui positivamente para o funcionamento do aparelho auditivo.

5. EXISTEM RISCOS ASSOCIADOS À UTILIZAÇÃO DO EARCLIN ADVANCED SPRAY PARA OS OUVIDOS?

Não são conhecidos efeitos secundários adversos dos ingredientes utilizados no Earclin advanced spray para os ouvidos.

Alergias

Em caso de reação alérgica ou de hipersensibilidade a um dos ingredientes interromper a utilização do dispositivo médico e consultar um médico.

UTILIZAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ E/OU AMAMENTAÇÃO:

O earClin spray para ouvidos pode ser utilizado de forma segura durante a gravidez ou a amamentação. Em caso de dúvida, consulte primeiro o seu médico.

EARCLIN ADVANCED SPRAY PARA OS OUVIDOS COM OUTROS MEDICAMENTOS:

Não se recomenda a utilização do Earclin advanced spray para os ouvidos se já estiver a utilizar medicamentos no ouvido.

UTILIZAÇÃO EM CRIANÇAS:

Uma vez que o earClin spray para ouvidos é composto por óleos e ingredientes naturais, é adequado para uso em crianças a partir de 3 meses de idade. Escreva na embalagem a idade da criança.



⚠ ADVERTÊNCIAS:

Não aplicar o spray para os ouvidos em caso de perfuração do tímpano ou dos tubos transtimpânicos. Não pulverizar para os olhos. Se o spray entrar acidentalmente em contacto com a boca ou com os olhos, lavar imediatamente com água abundante. Manter fora do alcance das crianças.

6. CONTEÚDO

- spray para os ouvidos earClin
- Instruções de utilização

INGREDIENTES: OLEUM EUROPEA, SAW PALMETTO EXTRACT, PHYTOSTEROL COMPLEX, BISABOLOL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM (CINNAMON) LEAF OIL, SESAMUM INDICUM (SESAME) OIL, SEA WHIP EXTRACT, MURRAYA KOENIGII (CURRY) LEAF OIL, EUGENIA CARYOPHYLLUS (CLOVE) LEAF OIL, SPEARMINT OIL. NÃO CONTÉM CONSERVANTES

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO:

Este produto deve ser conservado num local fresco, afastado da luz solar, à temperatura ambiente e não deve ser exposto a temperaturas superiores a 50 °C. Manter fora do alcance das crianças.

📅 DATA DE VALIDADE:

Não utilizar após o prazo de validade: ver parte inferior da embalagem

EXPLICAÇÃO DOS SÍMBOLOS

Os sinais e símbolos de aviso na embalagem e as os conselhos de utilização são essenciais para garantir que utiliza este produto de forma segura e correta e proteger a si e aos outros de lesões. Os símbolos são explicados na tabela seguinte:

Símbolo	Explicação	Símbolo	Explicação
	Símbolo do fabricante		Símbolo que indica o identificador único do dispositivo
	Símbolo que indica que deve consultar as instruções de utilização		Importador
	Símbolo que indica que é necessário ter cuidado ao utilizar o dispositivo		Manter fora do alcance das crianças
	Representante autorizado da UE		Símbolo do número de lote
	Limite superior de temperatura (50 °C)		Símbolo que indica que o produto é um dispositivo médico
	Eliminação de resíduos		Utilizar até: (data de validade)
	Não deve ser utilizado em crianças com menos de 3 meses		

Qualquer incidente grave relacionado com este produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro onde o utilizador estiver localizado.

7. CONTACTOS



Distribuidor:

Laboratórios Expanscience
Avenida Dom João II, 15 e 17,
3º andar, L-N, Loja 6D, 1990-
078 Lisboa - Portugal



Fabricante:

Naveh-Pharma LTD.
11-19, Yad Harutzim St., P.O. 8139
Netanya, 4250519
Israel
www.navehpharma.com



OBELIS S.A.
53 Boulevard
Général Wahis 1030
Brussels,
Belgium