

earClin[®]

earshower

1. WAAROM WORDT ER GEADVISEERD OM ONZE OREN TE REINIGEN?
2. WAT IS EARCLIN EARSHOWER?
3. HOE MOET EARCLIN EARSHOWER WORDEN GEBRUIKT?
4. KAN EARCLIN EARSHOWER WORDEN GEBRUIKT DOOR MENSEN MET EEN GEHOORAPPARAAT?
5. ZIJN ER RISICO'S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN EARCLIN EARSHOWER?
6. WAAROM EARCLIN EARSHOWER?
7. INHOUD
8. CONTACTGEGEVENS

1. WAAROM WORDT ER GEADVISEERD OM ONZE OREN TE REINIGEN?

Oorsmeer, of cerumen, is een zelfreinigend middel dat ons lichaam produceert. Het verzamelt vuil, bacteriën en ander afval. Meestal werkt de smeer zich naar buiten door kauwen en andere bewegingen van de kaak.

Oorsmeer kan zich opstapelen en ons gehoor beïnvloeden. Wanneer er zoveel oorsmeer is opgestapeld dat dit gebeurt, noemen we dit impactie, of oorprop. Als bij u sprake is van impactie, kunt u last hebben van een of meerdere van de volgende symptomen:

- pijn in het aangetaste oor
- vol gevoel of oorsuizen
- minder gehoor in het aangetaste oor
- een geur uit het aangetaste oor
- duizeligheid
- hoesten

Raadpleeg in dat geval een arts. EarClin earshower is hiervoor niet geschikt.

De kans dat er een teveel aan oorsmeer ontstaat is groter als je een gehoorapparaat of oordopjes gebruikt. De vorm van de gehoorgang kan de natuurlijke verwijdering van smeer bemoeilijken.

2. WAT IS EARCLIN EARSHOWER?

EarClin earshower is een nieuw ontwikkeld product en is gebaseerd op dezelfde techniek die de oorspecialist gebruikt. EarClin earshower bevat een zeepoplossing die het teveel aan oorsmeer wegspoelt. Uw gehoorgang wordt voorzichtig schoongespoeld met water dat verrijkt is met een unieke zeep. Een eenvoudige methode voor het reinigen van oren. EarClin earshower is een effectieve oplossing voor het regelmatig thuis reinigen van de gehoorgang. Wij adviseren om earClin earshower deel uit te laten maken van uw persoonlijke verzorging en hygiëne, net als het poetsen van uw tanden. Voorkom infecties en verbeter uw gehoor: gebruik het zeepwater in earClin earshower om overmatig oorsmeer weg te spoelen.

EarClin earshower is bijzonder handig voor:

- Sporters die regelmatig met water in aanraking komen
- Personen die veel cerumen aanmaken.
- Personen die een gehoorapparaat, oorsbeschermers of inwendige oortelefoontjes dragen.
- Personen die regelmatig met stof of vuil in aanraking komen.

3. HOE MOET EARCLIN EARSHOWER WORDEN GEBRUIKT?

- We raden aan om de earClin earshower regelmatig te gebruiken (2-3 keer per week) om de oorgang schoon te houden. Bij overmatig oorsmeer mag de earClin earshower elke dag worden gebruikt voor een periode van 2 weken aansluitend.
- Gebruik earClin earshower maximaal 30 dagen na het eerste gebruik. Wanneer de blauw indicator in de zeep binnen 30 dagen oplost, stop dan met het gebruik van de earClin earshower.

EarClin earshower is geïndiceerd voor:

- Is bedoeld voor personen met overmatig cerumen (oorsmeer).
- Personen die het buitenste deel van hun gehoorgang schoon willen houden.
- Volwassenen om zelf te gebruiken.
- De versie voor kinderen (vanaf 3 jaar) is bedoeld voor toediening bij kinderen, met hulp van een volwassene.

Het beste tijdstip om earClin earshower te gebruiken is wanneer u onder de douche of in bad gaat. Spoel de earClin earshower voor gebruik tweemaal met schoon water en zuig er daarna handwarm water (max. 40°C) in op, spoel het oor uit en laat drogen. Gebaseerd op de reinigingsmethode die door specialisten wordt gebruikt, reinigt earClin earshower de oren met natuurlijk, handwarm water. Het zeepstaafje (medische zeep) in de tube vergemakelijkt niet alleen het reinigingsproces, maar geeft ook aan hoe lang de earClin earshower nog kan worden gebruikt.

Hoe moet earClin earshower worden gebruikt?

Aanzuigballon: Gebruik de aanzuigballon om handwarm water (max. 40°C) in de earClin earshower op te zuigen, en laat dit voorzichtig in de gehoorgang lopen. Gebruik vervolgens de lege earClin earshower om lucht in de gehoorgang te blazen, om resterend vocht te verwijderen. Vul de earClin earshower één keer met lauw water. Spoel het oor drie keer achter elkaar bij elk gebruik. De aanzuigballon hoeft niet tussentijds bijgevuld te worden.

Spuitstuk: Plaats het spuitstuk tegen de opening van de gehoorgang. Door de vorm en grootte kunt u de earClin earshower niet te ver in uw oor duwen.

Zachte en effectieve zeep: Wanneer de bestanddelen in de earClin earshower worden gemengd met water, produceren ze een zachte maar effectieve vloeibare zeep. Als het zeepje niet meer blauw is, is uw earClin earshower leeg en dient u hem te vervangen.

4. KAN EARCLIN EARSHOWER WORDEN GEBRUIKT DOOR MENSEN MET EEN GEHOORAPPARAAT?


EarClin earshower is speciaal bedoeld voor mensen die een gehoorapparaat dragen, omdat regelmatig gebruik (2-3 keer per week) een optimale hygiëne is van de gehoorgang, wat positief bijdraagt aan de werking van het gehoorapparaat.

5. ZIJN ER RISICO'S VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN EARCLIN EARSHOWER?

EarClin earshower wordt goed verdragen en is speciaal ontwikkeld voor alle leeftijden boven 3 jaar. Kleine onderdelen leveren verstikkingsgevaar op – buiten bereik van kinderen jonger dan 3 jaar houden. Stop met het gebruik van de earClin earshower als u een allergische reactie krijgt. Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de bestanddelen.

⚠ Niet gebruiken zonder medisch advies in geval van otitis (oornsteking), pijn in het oor, een geperforeerd trommelvlies en door mensen die last hebben van duizeligheid of die in het verleden medische problemen hebben gehad met hun oren of trommelvliezen.

- U kunt, zonder dit te weten, een oorprop hebben en het is mogelijk dat de oorprop toeneemt door earClin earshower, wat ongemak kan veroorzaken. Raadpleeg in dat geval een arts.

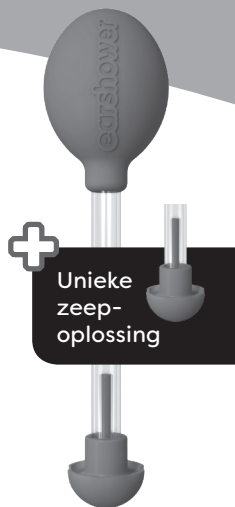

Unieke
zeep-
oplossing

- EarClin earshower mag niet worden gebruikt bij kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar of bij aandoeningen aan de betreffende gehoorgang of het trommelvlies.
- EarClin earshower mag alleen door volwassenen worden gebruikt. De versie voor volwassenen is bedoeld om zelf te worden gehanteerd door volwassenen of om te worden toegediend door een volwassene bij een andere volwassene. De versie voor kinderen is bedoeld voor toediening bij kinderen, met hulp van een volwassene.

EarClin earshower mag niet worden gebruikt

- Bij personen met bestaande beschadiging (bijvoorbeeld perforatie), buisjes, vervorming van het trommelvlies of bij een oorontsteking.
- Bij personen met bestaande beschadiging van de gehoorgang of een oorontsteking.
- Bij kinderen jonger dan 3 jaar.
- Bij personen die last hebben (gehad) van duizelingen. Of in het verleden medische problemen met oren/trommelvlies (zie ook boven bij waarschuwing).
- Gebruik earClin earshower maximaal 30 dagen na het eerste gebruik. Wanneer de blauw indicator in de zeep binnen 30 dagen oplost, stop dan met het gebruik van de earClin earshower.

⚠ Als uw gehoorgangen verstopt zijn, wordt een bezoek aan een arts geadviseerd. Nadat de oren professioneel zijn gereinigd door een specialist, adviseren we regelmatig uitspoelen met de earClin earshower om te voorkomen dat zich weer oorsmeer opstapelt.

6. WAAROM EARCLIN EARSHOWER?

EarClin earshower spoelt het oorsmeer grondig uit zonder mechanische ingreep. De ronde vorm van het oorstuk zorgt ervoor dat het apparaatje prettig aanvoelt in het oor van de gebruiker. Door de afmeting is het niet mogelijk om het apparaatje te ver in de gehoorgang te duwen, de kans op beschadiging (met name van het trommelvlies) is klein. Het oorstuk is tegelijkertijd ook een spuitstuk. Het gepatenteerde ontwerp zorgt ervoor dat de spoeloplossing in de gehoorgang wordt verspreid. Het olijfvormige oorstuk bevat ook een mechanisme dat beschermt tegen overmatige druk. Houd uw earClin earshower binnen handbereik wanneer u een bad of douche neemt.

7. INHOUD • 1 earClin earshower • Gebruiksaanwijzing

INGREDIËNTEN: NATRIUMTALLOWAAT, GLYCERINE, AQUA (WATER), SORBITOL, SACHAROSE, PEG-400 1, TETRANATRIUM

UITLEG VAN SYMBOLEN

De waarschuwingssymbolen en -symbolen op de verpakking en in de gebruiksaanwijzing zijn essentieel om ervoor te zorgen dat u dit product veilig en correct gebruikt en om uzelf en anderen te beschermen tegen letsel. De symbolen worden uitgelegd in de onderstaande tabel:

Symbool	Uitleg	Symbool	Uitleg
	Symbool voor de fabrikant		Symbool dat de unieke apparaat-ID aangeeft
	Symbool dat indicaties geeft om de gebruiksaanwijzing te raadplegen		Niet geschikt voor kinderen van 3 jaar en jonger
	Symbool dat aangeeft dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het apparaat		Buiten bereik van kinderen houden
	Productiedatum		Symbool voor het lotnummer

	Geeft aan dat een medisch hulpmiddel beschermd moet worden tegen vocht		Symbool dat aangeeft dat het artikel een medisch hulpmiddel is
--	--	--	--

Elk ernstig incident dat zich in verband met dit product heeft voorgedaan, moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker is gevestigd.

8. CONTACTGEGEVENS
Vragen? Neem gerust contact met ons op: 085 4444 202

Fabrikant/Distributeur

TheOTCLab
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
Nederland
www.theotclab.nl

10ml











